

GranuGEL®

Hidrokoloidu gēls CE 0086



Lietošanas pamācība.
Pirms lietošanas, lūdzu,
UZMANĪGI IZLASIET!

PRODUKTA APRAKSTS

GranuGEL® ir sterils gēls, kas sastāv no hidrokoloidiem (pektīna, nātrija karboksimetilcelulozes) caurspīdīgā, viskozā pamatmasā.

INDIKĀCIJAS

GranuGEL® paredzēts daļēja un pilna dziluma brūču, piemēram, kāju čūlu un izgulējumu ārstēšanai. Gēls rada mitru, dziedējošu vidi, kas veicina bojāto audu atzīšanu.

KONTRINDIKĀCIJAS

Nav ieteicams lietot indivīdiem, kuriem ir zināma jutība pret gēlu vai tā sastāvdaļām.

NORĀDĪJUMI

Hroniskās brūcēs bieži savairojas mikroorganismi, un tā nav kontrindikācija GranuGEL® lietošanai. Ja GranuGEL® lietošanas laikā rodas infekcija, jāsāk atbilstoša antibiotiku terapija. GranuGEL® lietošanu var turpināt, bet uzmanīgi ir jāvēro brūces dziļšana un ārstēšana jāveic medicīnu uzraudzībā.

GranuGEL® lietošanas drošība III pakāpes apdegumu gadījumā nav pārbaudīta.

Diabētisko čūlu ārstēšanā jāiekļauj arī glikozes līmeņa kontrole asinīs un spiedienu pazeminoši pasākumi.

GranuGEL®, radot brūcē mitru vidi, veicina bojāto un nekrotisko audu atdalīšanos. Tā rezultātā pēc pirmajām pāris pārsēju nomainām brūce var izskatīties lielāka.

Šis produkts ir sterils. Ja tūbiņas iepakojums ir bojāts, nelietojiet to.

UZKLĀŠANA UN NOŅĒMŠANA

Pēc vispārējās klīniskās prakses noteikumiem ar sterilu ūdeni vai fizioloģisku šķīdumu rūpīgi notīriet brūci. Nosusiniet apkārtējo ādu.

Atskrūvējiet tūbiņas vāciņu un noņemiet balto drošības gredzenu.

Uzlieciet atpakaļ vāciņu, lai pārdurtu tūbiņas membrānu. Uzlieciet GranuGEL® tieši uz brūces. Neuzklājiet gēlu ārpus brūces uz veselās ādas. Optimālu vidi brūces dziļšanai var nodrošināt, pārklājot brūci ar mitrumu aizturošu pārsēju, piemēram, Granuflex®.

GranuGEL® jāmaina, vai nu tad, kad zem pārsēja parādās eksudāta sūkšanās, vai arī mainot pārsējus. Gēlu var noskalot ar fizioloģisku šķīdumu. Jebkurā gadījumā GranuGEL® ieteicams mainīt ne retāk kā 3 dienās, ja to lieto uz nekrotiskām brūcēm, vai ne retāk kā 7 dienās, ja to lieto uz tīrām granulējošām brūcēm.

IESAIŅOJUMS

Sterils gēls pa 15g, kastītē 10 tūbiņas.

ICC kods: 187990

Vienreizējai lietošanai.

Sterilizēts autoklāvā. Nesterilizēt atkārtoti.

Sterilitāte garantēta, ja vien tūbiņa nav bojāta vai atvērta pirms lietošanas.

UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt līdz 25° C; nesasaldēt.

Razotājs: ConvaTec Limited, Deeside CH5 2NU, UK

<http://www.convatec.com>

Pārstāvis: SIA Linus Medical
K.Valdemāra iela 33A-3A,
Rīga, LV-1010



ConvaTec

Bez maksas informātvais tālrunis: 800 0 5333

Tālr.: 67316323

Fakss: 67294865

©2015. ConvaTec Inc.

© Ir ConvaTec Inc. tirdzniecības markas