



Гидроколлоидная повязка с каймой

Для разового использования

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ: Granuflex с каймой это гидроколлоидная перевязка, состоящая из внутреннего (соприкасающегося с раной) слоя гидроколлоидов, взвешенных в полимерной матрице, обладающих свойством прилегания, и внешнего слоя полиуретановой пленки. Повязка взаимодействует с выделениями из раны, образуя влажную среду, которая поддерживает процесс заживления, абсорбирует экссудат и содействует аутолитическому очищению раны. Повязка выпускается с клейкой каймой, поэтому дополнительное применение лейкопластыря не является необходимым. Granuflex с каймой может применяться как первичная повязка или в качестве вторичной повязки в сочетании с другими материалами, применяемыми для перевязки ран.

ПОКАЗАНИЯ: Затяжные раны - Кожные изъязвления (в том числе раны, охватывающие всю толщину кожи), пролежни (степени I - IV), изъязвления голеней. **Острые раны** - поверхностные раны (например, небольшие ссадины), ожоги второй степени, места после взятия материалы для пересадки.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Изделие не предназначено для пациентов с выявленной повышенной чувствительностью к повязке или ее компонентам.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

1) Если существуют показания, следует применять дополнительные вспомогательные средства (например, перевязки с постепенной силой нажима в лечении изъязвления голени венозного происхождения или уменьшающих нажим в лечении пролежней). 2) Среда, содействующая процессам аутолитического очищения, созданная благодаря применению повязки, может привести к тому, что рана будет казаться больше при нескольких первых сменах повязки. 3) Колонизация затяжных ран бактериями это частое явление которое не составляет противопоказания для применения повязки. В случае инфицированных ран повязка может применяться под надзором врача в сочетании с соответствующим лечением антибиотиками и частым наблюдением за раной. 4) В вредных случаях было описано раздражение и/реакции. 5) Не рекомендуется частая смена повязки в случаях ран с кожными изменениями возле изъязвленной анаэробной инфекции.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ

Хранить при комнатной температуре
Защищать от влаги

Изделие поставляется в стерильном виде. Не применять, если непосредственная упаковка повреждена.

**НАКЛАДЫВАТЬ ПОВЯЗКУ,
КОТОРАЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ 2 СМ
ПОЛЯ ВОКРУГ УЧАСТКА РАНЫ (НЕ
ВКЛЮЧАЯ ОКАЙМЛЕНИЕ)**

Примечание: Когда повязка
обсорбирует экссудат и образуется
гель, на внешней стороне повязки
может наблюдаться пузырек.

1. Снять защитную бумагу только с
верхней части. ПРИМЕЧАНИЕ:
Треугольную повязку можно
накладывать в разных направлениях,
в зависимости от размещения
изъязвления. В случае изъязвления в
области крестца повязку можно
сложить вдоль пополам, чтобы
удобнее было накладывать ее в
складках в этой области.

2. Наложить повязку на рану.
Разгладить поверхность, особенно по
краям, которые окружают клейкую
среднюю часть.

3. Отогнуть конец и снять защитную
бумагу с клейкой поверхности каймы,
прикрепить края к коже.

4. Для снятия повязки - одной
ладонью прижать кожу, а второй
осторожно поднять край повязки. Не
рекомендуется оставлять повязку на
ране более 3-х дней.

Упаковка

Код	Размер	Количество в упаковке
187970	6 cm x 6 cm	5
187971	10 cm x 10 cm	5
187973	10 cm x 13 cm	5



ConvaTec

ConvaTec Limited,

Deeside, UK

Представитель: SIA „Linus Medical”

K.Valdemāra iela 33a-3a, Rīga, LV-1010

Бесплатный телефон: 8000 5353

© „Linus Medical” SIA, 2019

® ir ConvaTec Inc.tirdzniecības markas